




ПЕРЕМЕШИВАНИЕ ПРОБИРОК

Пробирки должны перемешиваться сразу же после заполнения кровью и извлечения из держателя.

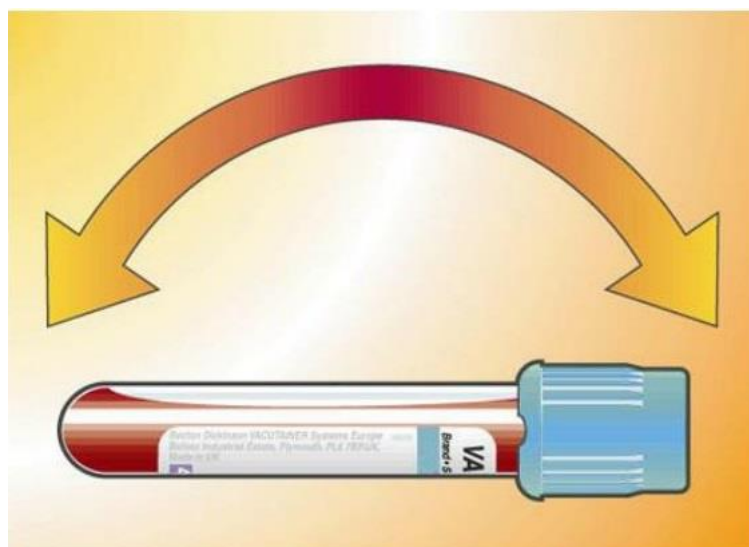

Тщательно и осторожно перемешивайте пробирки, это предотвратит гемолиз!

Строго соблюдайте порядок наполнения пробирок



- Флаконы для гемокультивирования
- Пробирки для коагуляции
- Пробирки для определения СОЭ
- Пробирки для сыворотки
- Пробирки для сыворотки с гелем
- Пробирки для плазмы с гепарином, гелем
- Пробирки для гематологии

